



Tutorial


Pico neo 3 pro



Innhold

1. Primære knapper
2. Beskrivelse av håndkontroller
3. Arbeidsområde
4. Finne kurs
5. Koble til wifi
6. Screencast
7. Ofte stilte spørsmål
8. Viktig helse- og sikkerhetsnotater

Primære knapper på brillen

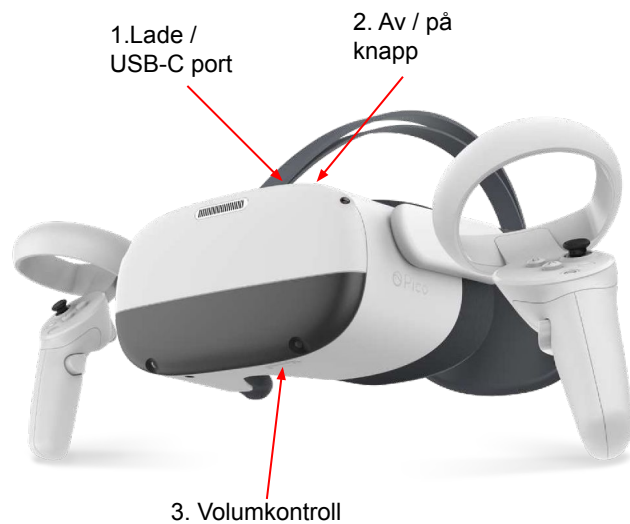

Beskrivelse av håndkontroller



1. Picoknapp
 - a. Kort trykk - Aktiverer håndkontrollere ved oppstart
 - b. Kort trykk - Gir tilgang til hurtigmeny
 - c. Langt trykk - Midtstiller arbeidsområde
 - d. Dobbeltrykk - Starter opptaksfunksjon (dobbeltrykk stopper opptaksfunksjon)
2. Triggerknapp
 - a. Pek og trykk med triggerknapp for å velge
 - b. Trykk inn triggerknapp for å gripe objekter i pasientrommet

Guide - Grunnleggende oppsett: **Arbeidsområde**

1. Skru på og av brillen ved å holde inne "Av/på - knapp" i ca. 3 sekunder.
2. Instruksjonene i brillen vil nå starte automatisk
 - a. Aktiver håndkontrollene ved å trykke på picoknappen, du vil kjenne er kort vibrasjon ved aktivering.
 - b. Du blir nå bedt om å velge mellom "Quick boundary" og "Custom Boundary", vi anbefaler "Custom Boundary".
 - i. Nå skal du justere riktig gulvhøyde, dette gjør du ved å bøye deg ned og legge håndkontroller helt ned på gulvet og trykk inn triggerknappen på en av håndkontrollerene. Du vil nå se stjerneteppeet ligge nede på gulvet.
 - ii. Når gulvet er satt riktig trykker du "next" - du skal nå merke opp grensen for hvor du kan bevege deg, også kalt arbeidsområde. Hold inne triggerknappen for å tegne opp et område. Her kan du tegne rundt bord, stoler eller andre hindre som kan være i rommet. Vi anbefaler at du lager så stort område som mulig. Når området er ferdig opptegnet og blitt grønt, trykker du på "next" deretter "start play".




Guide - Grunnleggende oppsett: **Finne kurs**

1. Når gulv og arbeidsområde er satt opp, vil du komme til menysystemet. Her kan du velge mellom våre kurs innenfor fysisk- og mental helse. Våre briller blir som standard satt opp og levert med "kioskmode". Dette vil si at du kommer direkte inn i vår kursmeny.
2. Hvis brillen ikke er satt opp med "kioskmode", må du gjøre følgende for å starte vårt kurs.
 - a. Velg "Library" fra menylinjen
 - b. Trykk deretter på ikonet merket "MakingView VR-kurs"



Guide - Grunnleggende oppsett: **Koble til wifi**

Hvis man skal være flere i feks. pasientrommet eller i refleksjonsrommet, må brillen være koblet til internett, dette gjør på følgende måte

1. Trykk kort på picoknappen - som gir deg tilgang til pico sin hurtigmeny.
2. Trykk deretter på wifi symbolet  nederst på hurtigmenyen
3. Du vil nå få opp en liste med tilgjengelige nettverk der du er. Velg aktuelt nettverk og tast inn passord (trykk med triggerknappen i tekstruten for å få frem tastaturet). Når brillen er koblet til nett vil det være en grønn hake ved det valgte nettverket.

Guide - Grunnleggende oppsett: **Screencast**

Slik går frem for screencast

1. Trykk kort på picoknappen for å komme til hurtigmeny
2. Trykk på symbolet for screencast (dette er enten en tv eller standard symbol for casting).
3. Velg "cast to browser"
4. Skriv inn nettadressen du får oppgitt i brillen, inn i nettleseren på pc. Her er det viktig at brille og PC er på samme nett.
5. Du får nå spørsmål om du tillater casting, trykk "allow".
6. Alt innhold i brillen vil nå bli vist på valgt PC



Ofte stilte spørsmål

- Håndkontrollene virker ikke
 - Håndkontrollene kan være deaktiverte. Trykk ett lett trykk på picoknappen på begge kontroller. Du skal da få "stråle" ut fra begge hender.
 - Sjekk at du har batterier i håndkontrollene og at de virker
- Du er for lav eller for høy i pasientrommet
 - Virtuelt gulv er satt til feil høyde. Trykk på picoknapp for å komme til hurtigmeny, og trykk på ikonet som viser en person med en sirkel rundt. Lag nytt virtuelt arbeidsområde og sørg for at gulvet låses i riktig høyde. Se "guide oppsett arbeidsområde".
- Dere skal møtes i pasientrommet, men det står "kobler til server" uten at noe skjer
 - Du er ikke koblet til wifi. Trykk på picoknapp for å komme til hurtigmeny, og koble til wifi. Har du allerede koblet til og det ikke virker, prøv et annet nett ved anledning. Sjekk også om dere blir forhindret av brannmur.
- Bildet er uklart
 - Tørk over linsene med brillereis eller brilleklut
 - Prøv å justere linsene manuelt i brillen. Du kan fysisk dytte på de for å justere mellomrommet mellom linsene
 - Sjekk at brillen sitter godt på, juster ved behov
 - Hvis du bruker briller, prøv både med og uten
- Videoer spilles ikke av i valgt kurs (gjelder de med Manage XR)
 - Brillen er ikke ferdig oppdatert. Koble brillen til lader og se til at den er koblet til wifi. Vent et kvarter og prøv på nytt
- Jeg ser kurs i menyen, men det går ikke an å velge det
 - Da har du ikke lisens som gir deg tilgang til det aktuelle kurset
- Jeg prøver å caste til nettleser, men jeg får ikke koblet til
 - Sjekk at nettadressen er korrekt skrevet inn
 - Sjekk at PC og brille er på samme nettverk
- Hvordan rengjør jeg brillen?
 - Linser: Bruk våtservietter eller produkter egnet til brillereis. Du kan også bruke en tørr brilleklut dersom linsen ikke er synlig tilsmusset.
 - Resten av brillen + kontroller: Vipes med overflatedesinfeksjon eller andre rengjøringsmidler for medisinteknisk overflate. Tørk over med fuktig klut til slutt.

Viktige helse- og sikkerhetsnotater

- Dette produktet er designet og ment å brukes i et åpent og sikkert innendørsområde, fri for eventuelle farer for å snuble eller skli. For å unngå ulykker, vær oppmerksom på mulige begrensninger i fysisk plass og respekter grensen til det virtuelle området ditt når du ser det. Sørg for å ha på deg lanyarden når du bruker kontrollene. Pass på at det er nok plass rundt hodet og kroppen din (minst 2 meter x 2 meter) til å strekke armene for å unngå skader eller skader på deg selv, andre og omgivelsene.
- Dette produktet anbefales ikke for brukere under 12 år. Barn over 12 år skal kun bruke dette produktet under voksenoppsyn.
- Dette produktet er designet for å tilpasse seg de fleste briller med styrke. Pass på å bruke VR-headsettet på en måte slik at VR-headset-linsene ikke gnir eller påvirker brillelinsene dine med styrke.
- Langvarig bruk kan føre til svimmelhet eller øyetrykthet. Det anbefales at du tar en pause hver 30. minutt. Du kan lindre øyetrykthet ved å se på fjerne gjenstander. Hvis du føler ubehag, stopper du å bruke produktet umiddelbart.
- **Ikke utsett optiske linser for direkte sollys eller andre sterke lyskilder. Eksponering for direkte sollys kan føre til permanent skade på skjermen. Skader på skjermen forårsaket av sollys-eksponering eller andre sterke lyskilder dekkes ikke av garantien.**
- For å redusere risikoen for ubehag, bør avstanden mellom pupillene (IPD) være passende innstilt for hver bruker.
- Dette produktet har en "øyevernmodus", sertifisert av TÜV Rheinland (Tyskland), som kan beskytte øynene dine ved å redusere blått lys i de tre fargesuperposisjonene ved hjelp av programvarealgoritmer. Skjermen fremstår gult i denne modusen, og du kan slå denne funksjonen på/av i "Innstillinger" → "Skjerm" → "Øyevernmodus".
- Beskytt optiske linser under bruk og lagring for å unngå skade

